


Technowood®



**STERILE
SHEET**
ステリシート

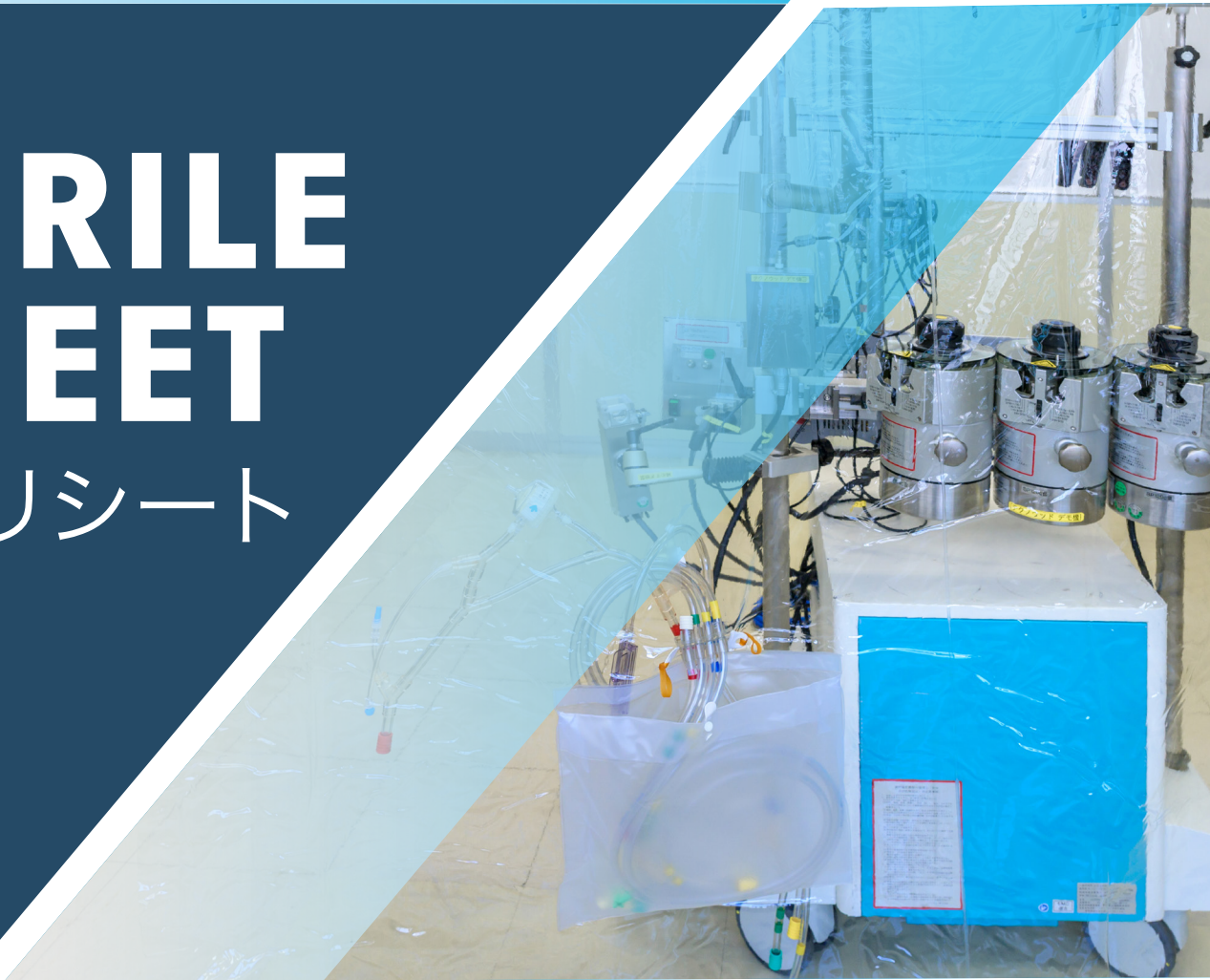

PTS NEO
人工心肺用回路システム

特徴

- 術者側と器械側回路の最短化を実現し、プラミングボリュームの削減が可能となります。
- 中央に配置された通称『カンガルーポケット』により回路の取り出し、片付けが容易になります。
- 清潔側／不潔側の『見える化』により、患者様および操作者の感染対策にも有効。

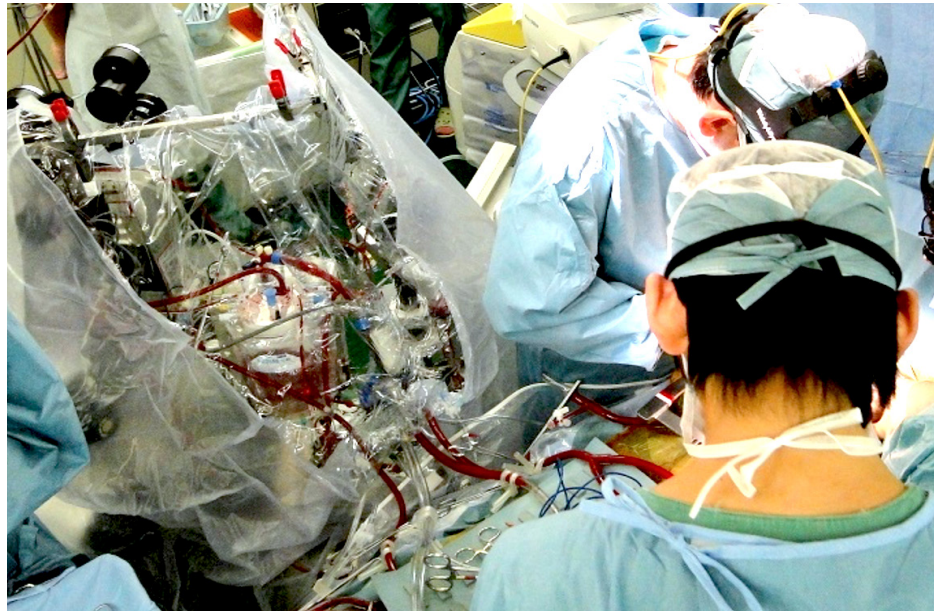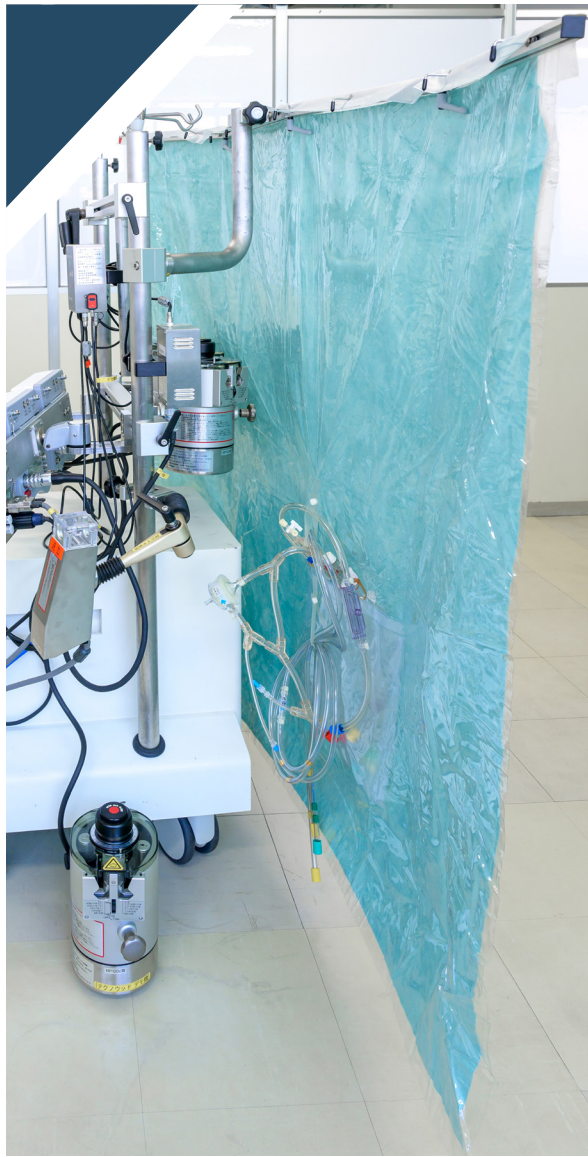

接触面積

聖隷
浜松

1912.9cm²
ステリシート付き回路

接触面積

標準

5813.8cm²
JaSECT標準化回路委員会推奨弊社回路

成人回路 (人工肺を除く)
**血液接触面積比
67%減少**

ステリシート付き回路充填量

体重 (kg)	~5	5~9	9~12	12~17	17~29	30~
充填量	100	115	125	130	220	430

(資料提供: 聖隷浜松病院臨床工学室)

ステリシート回路仕様

■ お客様の使い勝手を重視するため、
全て特注扱いでの製造となります。

- ① カンガルーポケットの位置
- ② 貫通するチューブの数量とサイズ
- ③ 各チューブのレイアウト




上記①～③を使用状況に合わせて決定
していただく事で、より安全で使い勝手
の良いステリシートが完成します。

術者側固定用機能
(より術者側へ近づけるための工夫)


カンガルーポケットは
開閉のボタンが付いており、
簡単に外して術者側回路を
取り出す事が可能です。



カンガルーポケット

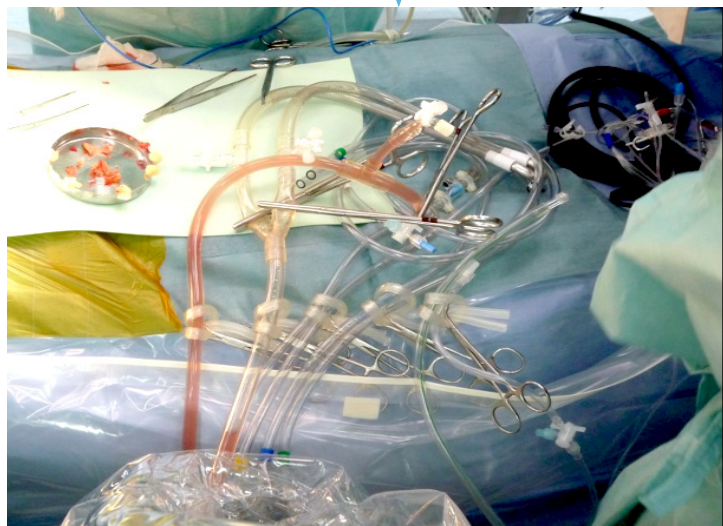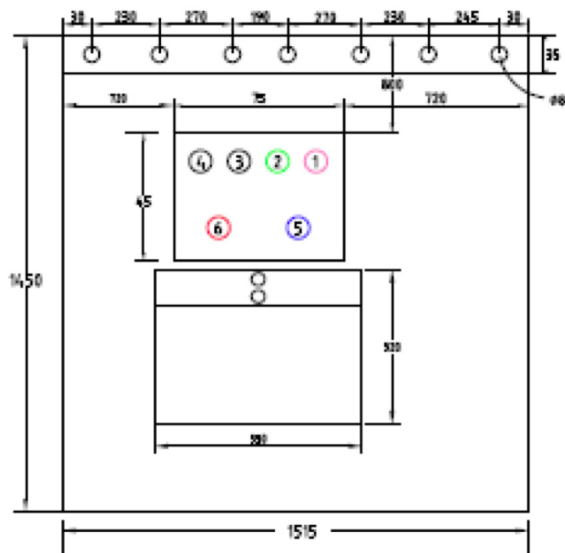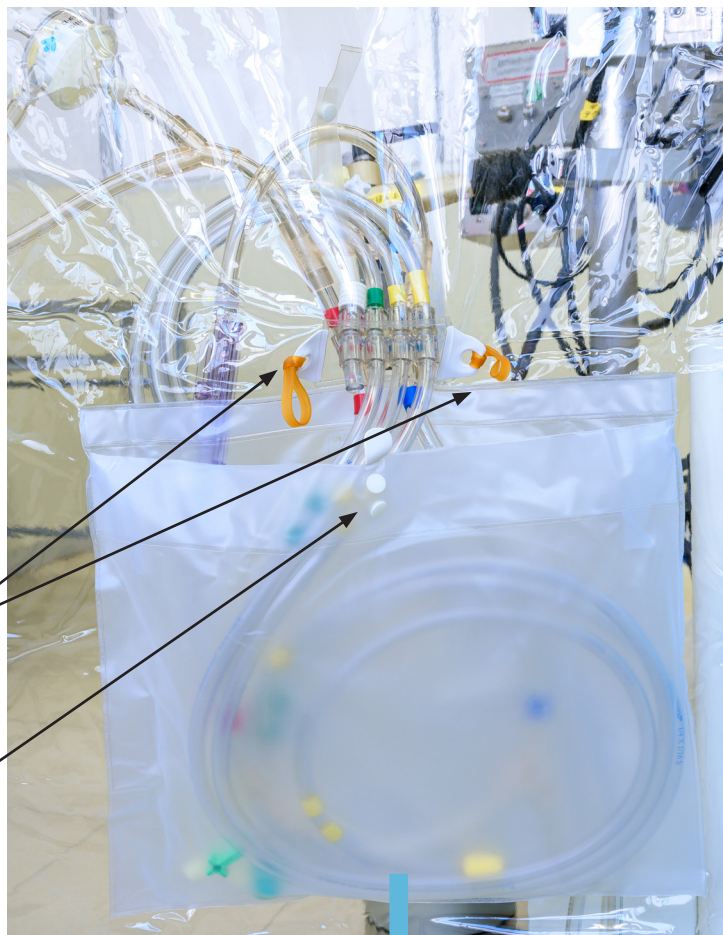

専用ステリシートホルダー

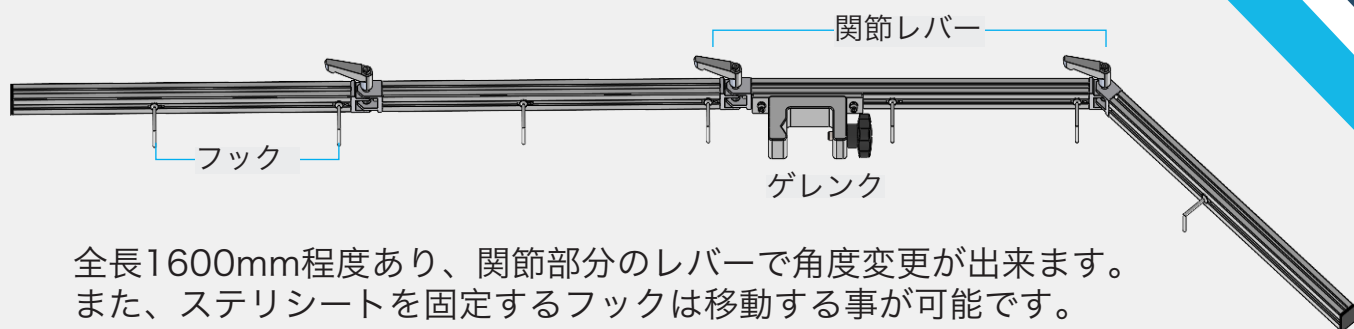

全長1600mm程度あり、関節部分のレバーで角度変更が出来ます。
また、ステリシートを固定するフックは移動する事が可能です。

開封方法

専用のステリシートホルダーにシートを取付け、左右の摘み部分を掴んで簡単にドレープを剥がす事が可能です。



製造販売元

テクノウッド株式会社

〒123-0872 東京都足立区江北4-30-19

代表 03(3856)4111 Fax 03(3856)4113

カスタマーサービス : 03(5647)3925

FAX・フリーダイヤル : 0120(322)571

www.technowood.co.jp

販売名:人工心肺用回路システム

医療機器承認番号:23000BZX00290000

製品の規格・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本品は Disposable により1回限りのご使用をお願いします。